



Propeaq lichtbril Model 1.0 B

Gebruikers Handleiding

Van harte gefeliciteerd met uw Propeaq lichtbril


Deze handleiding zal u helpen bij het gebruik van uw Propeaq lichtbril. U kunt de lichtbril handmatig bedienen.

Ter bestrijding van winterblues draag de bril met 30 minuten blauw licht in de ochtend, direct na opstaan. Voor een energie-boost draag de bril 30 minuten gedurende de dag, maar niet na 20.00 u. Een gedetailleerde instructie ter voorkoming van een jetlag of ter bestrijding van vermoeidheid tijdens nachtarbeid, raadpleeg de gratis Propeaq app.

De inhoud van de doos

De Propeaq lichtbril 1.0 B wordt geleverd in een compleet pakket met een USB kabel, een microfiber etui en een poetsdoekje, lichtblauwe glazen, oranje glazen en een stijlvol montuur met geïntegreerde LED's.

Binnenin het montuur vindt u de aan-/uitknop, de batterij-indicator lichtjes en de micro-USB-sleuf.

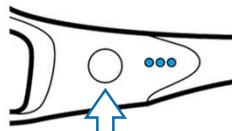

Aan/uit knop

Vóór gebruik

Laad voor gebruik van de Propeaq lichtbril 1.0 B bril eerst de batterij volledig op.

1. Steek de micro-USB in de lichtbril.
2. Verbindt het andere uiteinde, de USB, direct met een pc, ofwel een adapter en plaats deze in een wandcontactdoos.
3. Laad de lichtbril op tot de batterij-indicator, rechts naast de aan/uitknop, aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen. Bij een volledig lege batterij duurt dit circa 2 uur. Hierna is de gebruiksduur circa 2 uur, in het begin mogelijk iets korter.


De glazen - het gebruik van de glazen

De lichtblauwe glazen gebruikt u wanneer blauw licht van de Propeaq lichtbril 1.0 B is voorgeschreven. Naar wens kunt u de lichtbril ook zonder lichtblauwe glazen in het montuur gebruiken.


De oranje glazen gebruikt u om het blauwe deel van het daglicht of omgevingslicht te blokkeren. Het blauwe licht moet zijn uitgeschakeld wanneer de oranje glazen gebruikt worden.

De glazen zijn eventueel uitneembaar en zijn voorzien van UV-bescherming.

Om de lenzen te wisselen duwt u aan zijkant van buiten naar binnen tegen de lens. Zie afbeelding 1. Plaats uw duim aan de buitenkant van de lens en druk de lens uit het montuur. Voor het plaatsen van een nieuwe lens zet u de neuszijde van de lens aan de binnenkant van de neusbrug en drukt u de lens in het montuur totdat u een klik hoort. Hiervoor is de eerste keren enige kracht nodig. De lenzen en het montuur kunnen niet beschadigen door deze handelingen. Houdt het montuur en uw duimen zoals aangegeven op afbeelding 2.

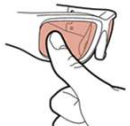

Afbeelding 1

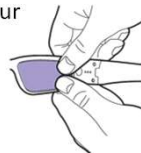


Afbeelding 2

De batterij

Om de levensduur van de batterij te maximaliseren adviseren we u de Propeaq lichtbril 1.0 B uit te schakelen wanneer u hem niet gebruikt. Extreme koude temperaturen kunnen de levensduur van de batterij negatief beïnvloeden. Om de capaciteit van de batterij in koude omstandigheden te maximaliseren, kunt u de bril op een warme plaats (kamertemperatuur) bewaren dan wel deze voorafgaande aan het gebruik op een warme plaats leggen.

- Bat 100% - 70%
- Bat 70% - 30%
- Bat 30% - 5%
- Bat 5% - 0%

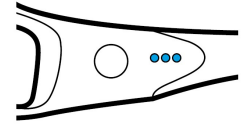

Gebruik van de Propeaq app

1. Download de Propeaq app uit de App Store (iOS) of Google Play (Android)
2. Volg de stappen in de app, beginnend bij stap 1

U kunt de Propeaq app downloaden vanuit de Apple store of de Google Play store.



Voeg na het downloaden uw persoonlijke gegevens toe volgens de schermen van de app om uw chrono type te bepalen.

Zorg ervoor dat de gegevens correct zijn. De app gebruikt uw chrono type voor berekeningen om zodoende een persoonlijk gebruikersschema te genereren.

Voor gebruik van de app verwijzen wij u tevens naar de supportpagina van Propeaq: www.propeaq.com/support

Handmatig gebruik

In het schema ziet u hoe u de Propeaq lichtbril 1.0 B gebruikt.

Functie	Actie	Resultaat
Aanzetten blauw licht	Druk de aan-/uitknop in gedurende 1 seconde	Het blauwe licht gaat aan
Uitzetten blauw licht	Druk 1x kort op de aan-/uitknop	Het blauwe licht gaat uit, bril is uitgeschakeld
Batterij check	Druk de aan-/uitknop in gedurende 2 seconden	De batterij indicator lichtjes gaan enkele seconden aan (indien het product is opgeladen)

Na 30 minuten schakelt de Propeaq lichtbril 1.0 B zichzelf uit

Waarschuwing

- Gebruik de Propeaq lichtbril 1.0 B niet langer dan voorgeschreven. In de meeste gevallen is dit 30 minuten.
- Gebruik de Propeaq lichtbril 1.0 B niet in het verkeer of in andere omstandigheden waarbij goed zicht vereist is.
- Gebruik de Propeaq lichtbril 1.0 B niet in een vochtige of natte omgeving.

Disclaimer

De informatie in dit document is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving en geeft geen enkele verplichting van de kant van de verkoper. Geen enkele garantie of verantwoording, expliciet of impliciet, wordt gedaan ten aanzien van kwaliteit, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van dit document. Alle aansprakelijkheid van welke aard dan ook dat voortvloeit uit het gebruik van dit product is uitgesloten. In geen geval is de fabrikant aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale, incidentele schade of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik dan wel het onvermogen om dit product of de documentatie te gebruiken, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. De inhoud van dit document is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding mag worden vervoelvoudigd of overgedragen, op welke wijze en voor welke doeleinden dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Productnamen die in dit document worden genoemd zijn slechts ter identificatie. Alle handelsmerken en productnamen die in dit document voorkomen zijn gedeponeerde eigendom van hun respectieve eigenaars.